


# ColoAlert Test - Gebrauchsanweisung Probenentnahme





## 1. Vorbereitung


- a) Entnehmen Sie alle Inhalte aus der Verpackung und legen Sie die Bestandteile auf eine saubere Oberfläche.
- b) Klappen Sie den beiliegenden Stuhlfänger auf und bringen Sie ihn mit Hilfe der Klebestreifen wie dargestellt an Ihrer Toilette an. Stuhlfänger und Stuhlprobe dürfen in Kontakt mit klarem Wasser, jedoch nicht mit Reinigungsmitteln kommen.

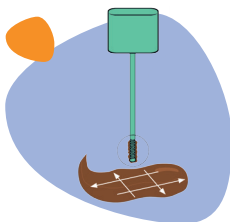

## 2. Okkultbluttest (FIT)

- a) Nach dem Stuhlgang zuerst das Proberöhrchen mit dem grünen Deckel nehmen. Halten Sie es aufrecht und schrauben Sie die grüne Kappe mit dem Entnahmestift ab. Drehen Sie das Röhrchen dabei nicht um.
- b) Mit der Spitze des grünen Teststabs an drei verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.
- c) Die Rillen der Spitze müssen danach vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.
- d) Teststab in das Proberöhrchen stecken und dieses somit verschliessen. Nach einem hörbaren «Klick» ist das Proberöhrchen ordentlich verschlossen. Probenentnahme nicht wiederholen!
- e) Das verschlossene Proberöhrchen kräftig schütteln. Stecken Sie es in den grünen Beutel und verschliessen Sie diesen.

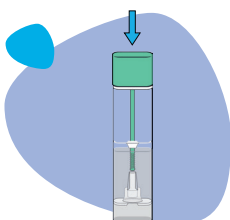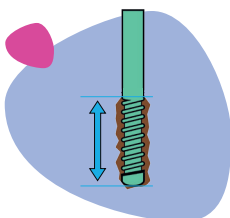

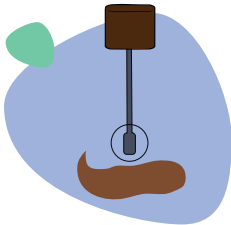


### 3. Genetische Tests

- a) Nehmen Sie das Röhrchen mit dem braunen Deckel.

**HINWEIS:** Um Reizungen zu vermeiden, darf die Flüssigkeit im Röhrchen nicht mit Augen und Haut in Kontakt kommen. Zudem darf sie nicht auslaufen.

- b) Schrauben Sie die Verschlusskappe des Röhrchens ab und entnehmen Sie mit dem Löffel, der am Deckel angebracht ist, an drei verschiedenen Stellen eine kleine Menge der Stuhlprobe.

**HINWEIS:** Die Gesamtmenge an Stuhl sollte etwa einem gehäuften Löffel entsprechen.

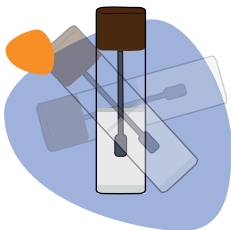

- c) Führen Sie den Löffel anschliessend in das Röhrchen zurück und drehen Sie dieses fest zu. Das Röhrchen nicht erneut aufdrehen!
- d) Schütteln Sie das Röhrchen 1 Minute lang kräftig.
- e) Lösen Sie den Stuhlfänger von der Toilettenbrille ab. Dieser ist wasserlöslich und kann mitgespült werden.

### 4. Probe verschicken

- a) Notieren Sie das Probenentnahmedatum auf dem Auftragsformular. Prüfen Sie, ob das Auftragsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben ist.
- b) Legen Sie das Auftragsformular zusammen mit dem braunen und dem grünen Röhrchen in die vorfrankierte Versandtüte. Verschiessen Sie den Beutel durch Abziehen der Lasche.
- c) Lagern Sie die verschlossene Versandtüte bis zum Versand bei Raumtemperatur.
- d) Geben Sie vorfrankierte Versandtüte spätestens 48 h nach Probenentnahme in der Post oder bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt ab.

