


# Mode d'emploi

## Prélèvement d'échantillons




### 1. Préparation

- a) Retirez tout le contenu de l'emballage et déposez les composants sur une surface propre.
- b) Ouvrez le collecteur de selles fourni et fixez-le à vos toilettes à l'aide des bandes adhésives, comme indiqué sur l'illustration. Le collecteur de selles et l'échantillon de selles peuvent entrer en contact avec de l'eau claire, mais pas avec des produits de nettoyage.

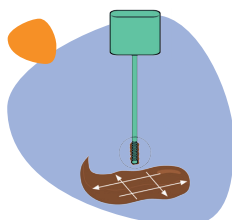


### 2. Test de recherche de sang occulte (FIT)


- a) Après être allé(e) à la selle, prenez le tube de prélèvement muni du couvercle vert. Tenez-le bien droit et dévissez le capuchon vert avec le stylo de prélèvement. Ne retournez pas le tube.
- b) Avec la pointe de la tige de test verte, frottez l'échantillon de selles à trois endroits différents.

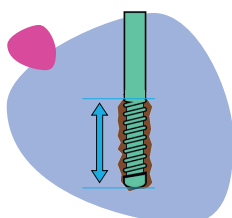

- c) Les rainures de la pointe doivent ensuite être entièrement remplies d'échantillon de selles.

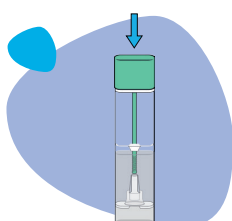

- d) Insérez la tige de test dans le tube de prélèvement et fermez le tube. Un «clic» audible indique que le tube de prélèvement est bien fermé. Ne pas répéter le prélèvement d'échantillons!
- e) Secouez énergiquement le tube de prélèvement fermé. Insérez-le dans le sachet vert et fermez celui-ci.

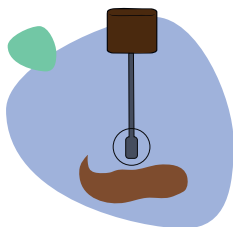


### 3. Tests génétiques

- a) Prenez le tube avec le couvercle marron.

**REMARQUE:** pour éviter toute irritation, le liquide contenu dans le tube ne doit pas entrer en contact avec les yeux et la peau. De plus, il ne doit pas s'écouler.

- b) Dévissez le capuchon du tube et prélevez une petite quantité de selles à trois endroits différents à l'aide de la cuillère fixée sur le couvercle.

**REMARQUE:** la quantité totale de selles doit correspondre à environ une cuillère bombée.

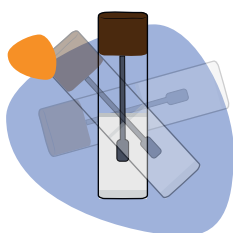

- c) Remettez ensuite la cuillère dans le tube et fermez celui-ci en serrant fermement le couvercle. Ne pas ouvrir le tube à nouveau!
- d) Secouez énergiquement le tube pendant 1 minute.
- e) Détachez le collecteur de selles de la lunette des toilettes. Il est soluble dans l'eau et peut être jeté dans les toilettes.

### 4. Envoyer l'échantillon

- a) Notez la date du prélèvement d'échantillon sur le formulaire de commande. Vérifiez que le formulaire de commande est entièrement rempli et signé.
- b) Placez le formulaire de commande avec les tubes brun et vert dans l'enveloppe d'expédition préaffranchie. Fermez l'enveloppe en retirant la languette.
- c) Conservez l'enveloppe d'expédition fermée à température ambiante jusqu'à l'envoi.
- d) Remettez l'enveloppe d'expédition préaffranchie à la poste ou à votre médecin au plus tard 48 heures après le prélèvement.

