

# Analyse capillaire

## Prélèvement d'échantillons

Testkit M900569


- Le sujet doit signer une autorisation préalable pour la prise d'échantillon ainsi que la prise en charge financière.
- Vérifier l'identité du sujet en contrôlant sa carte d'identité, sa photo et sa signature.
- Les données d'anamnèse du sujet sont à prélever lors de la prise d'échantillon.
- Notez les informations sur les traitements cosmétiques des cheveux, tels que décoloration, teinture, étirement, etc.

**Pour permettre l'exploitation légale des résultats, il est fondamental de remplir avec précision toutes les rubriques du formulaire ci-joint en présence du sujet et surtout avant le prélèvement.**

**! Fixer le sachet en plastique aux bords de la feuille.**



- Fixer les échantillons capillaires à l'aide de trombones sur les bords de la carte d'échantillonnage (respecter la naissance et les pointes des cheveux).
- Mettre la carte avec les échantillons capillaires dans le sachet en plastique.
- Sécuriser la fermeture avec l'étiquette de scellage. Doit rester scellé jusqu'à l'enregistrement au laboratoire.

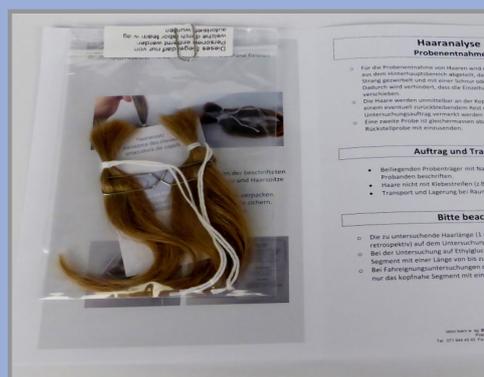



### Prélèvement d'échantillons

---

- Pour le prélèvement de l'échantillon capillaire une mèche de cheveux **de l'épaisseur d'un crayon** sera prélevée sur l'arrière de la tête, cette mèche sera entortillée et tenue ensemble par un fil, pour éviter tout glissement des cheveux les uns contre les autres.
- Les cheveux prélevés seront coupés à la base. La longueur restante de la mèche sur la tête devra être inscrite dans le formulaire d'analyse.
- Un **deuxième échantillon** de réserve doit être prélevé de la même manière.

### Information importante

---

- La longueur de cheveux restant après la coupe est à inscrire sur le formulaire (1 cm correspond à la rétrospective d'un mois).
- Pour l'analyse de Éthylglucuronide seule la partie proche de la tête, segment jusqu'à 3 cm, est analysée.
- Pour l'évaluation à la conduite, seuls les 6cm les plus proches de la tête sont analysés pour le dosage de drogues.