


## Istruzioni per lo striscio anale per la ricerca di ossiuri



Non rimuovere il terreno di trasporto Amies. **Non riempire la provetta con materiale fecale, ma utilizzare solo il tampone in dotazione.**



1. Il kit del test è costituito da una provetta per il prelievo eSwab® (Copan), compreso il tampone.

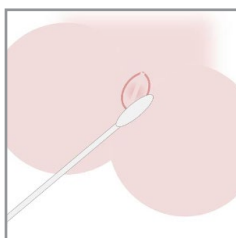

2. Prelievo del campione.

Al mattino, non appena il paziente si è alzato e prima che evacui o si lavi. Con un movimento rotatorio, applicare il tampone esercitando pressione sulla cute intorno all'orifizio anale. Le uova che non sono visibili ad occhio nudo sono deposte nelle pliche anali in prossimità dell'orifizio anale.



3. Dopo il prelievo, inserire nuovamente il tampone nella provetta e romperlo in corrispondenza del punto contrassegnato da una linea colorata.



4. Chiudere la provetta con il tappo e applicarvi un'etichetta che riporta i dati del paziente.