

Xpert Bladder Cancer Monitor


Art. Nr. M14119 Entnahmeanleitung «Xpert® Bladder Cancer Monitor»



1. Den Sammelbecher mit mindestens 4.0 ml Urin befüllen.



2. Ein Xpert® Urin Transport Reagenz Kit bereitstellen.

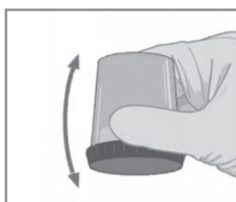

3. Den Becher 3-mal kippen, um den Urin zu mischen.




4. Die Pipette aus dem Xpert® Urin Transport Reagenz Kit nehmen.

Die Pipette am Boden des Sammelbechers ansetzen.



5. Ca. 4.0 ml des Urins in das Transportröhrchen übertragen, so dass die schwarze Volumen-markierung auf der Etikette erreicht wird.

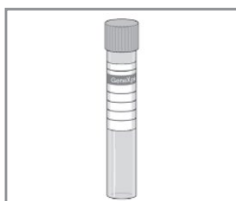

6. Das Röhrchen mit dem Deckel gut verschliessen, die Probe beschriften und an **labor team** senden.