


Xpert Bladder Cancer Monitor



1. Remplir le gobelet collecteur avec au moins 4,0 ml d'urine.



2. Préparer un kit Xpert® Urin Transport Reagenz.

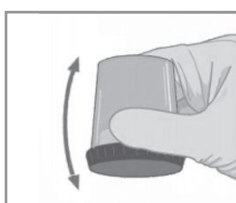

3. Basculer le gobelet 3 fois pour mélanger l'urine.




4. Prendre la pipette du kit Xpert® Urin Transport Reagenz.

Positionner la pipette au fond du gobelet collecteur.



5. Transvaser 4,0 ml d'urine dans l'éprouvette de transport, jusqu' au marquage noir sur l'étiquette.

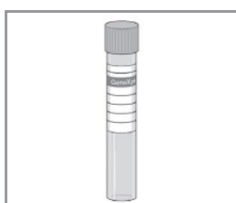

6. Bien refermer le tube, marquer l'éprouvette et l'envoyer à **labor team**.