


# Xpert Bladder Cancer Monitor



1. Versare nel contenitore almeno 4,0 ml di urina.



2. Tenere a portata di mano il Xpert® Urin Transport Reagenz Kit.

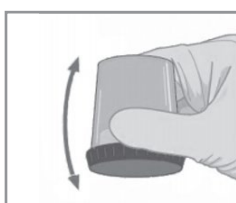

3. Capovolgere il contenitore 3 volte per miscelare l'urina.




4. Prendere la pipetta dal Xpert® Urin Transport Reagenz Kit.

Introdurre la pipetta nel contenitore fino a toccare il fondo del recipiente.



5. Trasferire ca. 4,0 ml di urina nella provetta per il trasporto, fino a raggiungere la tacca nera segnata sull'etichetta.

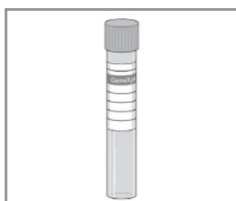

6. Chiudere bene il tubo, applicare un'etichetta sul campione e inviarlo a **labor team**.