

Instruction pour le prélèvement d'échantillons de SARS-CoV-2 par gargarisme



L'échantillon est prélevé sous surveillance du personnel médical afin d'assurer que le matériel prélevé provient bien du patient présent.

Préparation:

L'échantillon doit être prélevé au plus tôt **45 min après avoir mangé, bu ou s'être lavé les dents.** Le patient vient **avec un masque** et n'est autorisé à l'enlever que pour le prélèvement.







Matériel de prélèvement :

Gobelet, ampoule d'eau, tube à vide (ne pas ouvrir!)

Données du patient :

Coller l'étiquette du patient ou noter le prénom, le nom et la date de naissance sur le tube à vide (couvercle blanc).

Prélèvement d'échantillon :



 Presser le contenu de l'ampoule dans la bouche du patient.
Au moins 30 secondes de gargarisme profond, qui peut être interrompu. Pendant une pause du gargarisme, le liquide reste dans la bouche et la respiration se fait par le nez.



2. Le patient crache ensuite le liquide du gargarisme dans le gobelet, qui sera reposé et soigneusement fermé.

Enlever l'autocollant du couvercle, enfoncer le tube à vide dans l'orifice de transfert du couvercle du gobelet fermé. Par le vide, l'eau de gargarisme sera aspirée dans le tube.

laborteam.ch Préanalytique M14062/0823





3. Retirer le tube et le préparer pour l'envoi. Envoyer le tube à vide (couvercle blanc) au laboratoire par la voie habituelle. Numéro de profil : 66902.

laborteam.ch Préanalytique M14062/0823