

Modalità campionamento SARS-CoV-2 mediante sciacquo della gola (gargarismi)



Il campionamento avviene sotto la supervisione del personale dello studio per garantire che il materiale del campione provenga dal paziente presente.

Preparazione paziente:

Non mangiare, non bere e non lavare i denti almeno 45 minuti prima del campionamento. Il paziente deve indossare una **maschera di protezione e può toglierla solo per** il prelievo del campione.




Materiale per il prelievo:

Contenitore per la raccolta, fiala acqua sterile, provetta sottovuoto (non aprire!)


Dati del paziente:

Applicare l'etichetta identificativa sulla provetta sottovuoto (tappo bianco) o scrivere nome, cognome e data di nascita del paziente.

Prelievo del campione:

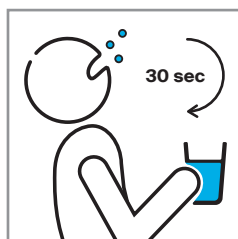

1. Premere il contenuto della fiala nel cavo orale. **Almeno 30 secondi di gargarismi profondi**, che possono essere interrotti. Durante la pausa dei gargarismi tenere il liquido in bocca e respirare col naso.

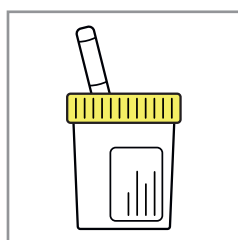

2. Espellere il liquido nel contenitore, appoggiare il contenitore sul tavolo e avvitare il tappo con cautela.

Togliere l'adesivo dal bicchiere ed inserire la provetta sottovuoto nell'apposito foro sul tappo del contenitore e premere. L'acqua di risciacquo della gola viene aspirata nella provetta sottovuoto.

