


Entnahme von Gelenkspunktaten


Entnahmematerial

Art. Nr. M226 Gelenkspunktat-Set

Technik

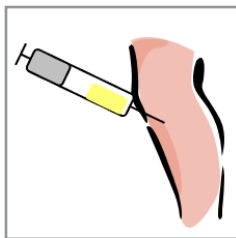


1. Punktion mit konventionellem Spritzensystem.

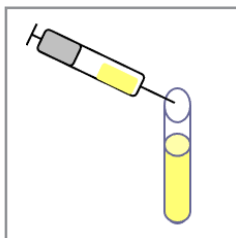

2. Umfüllen in die entsprechenden Sekundär-Röhrchen für den Versand (siehe Punkt 3–6).


- i** Welches Versandmaterial Sie für die gewünschten Untersuchungen brauchen, entnehmen Sie dem Beilagezettel des Gelenkspunktat-Sets.

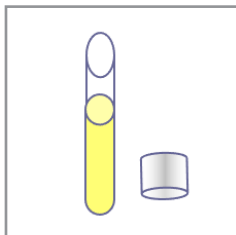

3. **Nativ-Punktat**

- Einfüllen
- Deckel zuschrauben
- Beschriften (Name, Vorname)

- i** Keine Blutentnahme Röhrchen (Nativblut, Trenngel) verwenden: Trenngel wie auch gerinnungsaktivierende Substanzen in den Röhrchen (Wandbeschichtung) verunmöglichen die Untersuchung auf Kristalle im Punktat.

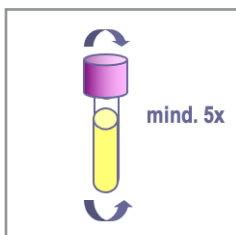

4. **EDTA-Punktat**

- Einfüllen
- Deckel zuschrauben
- Mind. 5 × über den Deckel kippen
- Beschriften (Name, Vorname)

- i** Da Punktate visköser sind als Blut, ist die gute Durchmischung besonders wichtig. Es kann zur Verklumpung von Zellen und dadurch zu falsch tiefen Leukozytenwerten kommen. Zur Untersuchung auf Kristalle nicht geeignet.

